

PROCÉDURE SMUR

TEST DU MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR DT7



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général de l'appareil : absence de fissures, de choc, pochettes bien fixées, visseries présentes, écran, boutons, batteries...
- S'assurer de la propreté de l'appareil (Vigilance accrue sur la propreté des connectiques : sable, poussière...)
- Vérifier l'intégrité des accessoires : câbles de monitoring, pochettes de protection...
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION


- Appuyer sur 
- Vérifier l'état de la batterie  (**charge $\geq 1/2$**) : sinon changer la batterie déchargée, et la remettre en charge dans son support.

3- TEST UTILISATEUR/ AUTO TEST

Il y a 2 façons d'effectuer l'auto test utilisateur :

Première possibilité : Lancer manuellement le contrôle des modules.

- Appuyer sur 
- Sélectionner **Menu > Post-intervention > Auto-test**
- Démarrer l'auto test

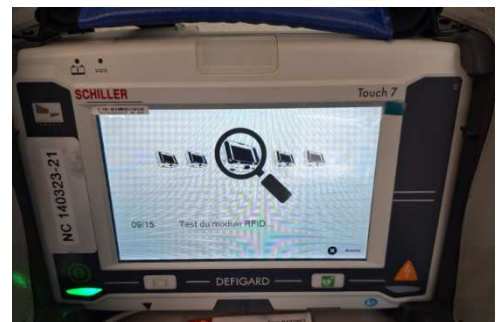



PROCÉDURE SMUR

TEST DU MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR DT7



- Si le message « appuyer sur le touche choc » apparait, appuyer sur la touche  pour continuer et terminer le test.

NB : Le nombre de paramètres à tester peut varier de 15 à 19 modules selon les appareils.

Deuxième possibilité : lors d'un changement de batterie, l'appareil effectue automatiquement cette procédure de vérifications de modules (donc changer la batterie puis allumer l'appareil afin de lancer le test).

4-VERIFICATION APPAIRAGE TABLETTE/SCOPE

- Cf. Procédure d'appairage (page3)

- Dans tous les cas, éteindre l'appareil en appuyant sur  à la fin des vérifications.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO.