



PROCÉDURE SMUR

TEST DU SYSTÈME D'ANALYSE D'HEMOGLOBINE HEMOCUE Hb 801



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil et son écran
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : valise de transport
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Appuyer sur le bouton « POWER »  pour mise sous tension de l'appareil

- Vérifier le témoin de pile  (**≥1/4 de batterie**) : sinon changer les piles.

- L'écran affiche  . L'appareil est prêt à l'emploi.

- Éteindre l'appareil, fermer sa valise de transport et la ranger dans le coffre prévu à cet effet.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO