


PROCÉDURE SMUR

TEST ASPIRATEUR À MUCOSITÉS LCSU



1- Etat général

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : batterie, bocal, câble d'alimentation : le couvercle du bocal est hermétique, le connecteur coudé et les tuyaux sont solidement fixés.
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

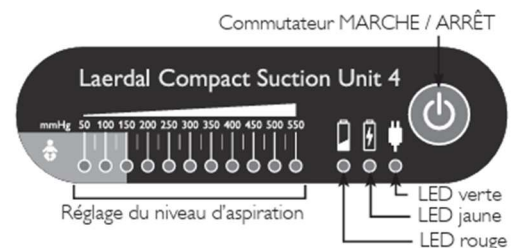

2- Test de fonctionnement

- Débrancher l'appareil du secteur d'alimentation.
- Mettre l'unité sous tension à l'aide du bouton « MARCHE/ARRÊT »
- Bloquer la tubulure d'aspiration.
- Régler le niveau d'aspiration sur 550mmHg à l'aide de la molette de réglage de pression, présente sur le côté gauche de l'appareil.
- Débloquer puis bloquer à nouveau la tubulure d'aspiration afin que l'appareil revienne au réglage de 550mmHg.
- Répéter la procédure pour les réglages à 300mmHg et 50mmHg.
- Vérifier le niveau de batterie : pendant le test du dispositif, le niveau de la batterie ne doit pas s'éclairer en ROUGE. Si c'est le cas, il convient de la charger.



PROCÉDURE SMUR TEST ASPIRATEUR À MUCOSITÉS LCSU



- ➔ Eteindre l'appareil à l'aide du bouton « MARCHÉ/ARRÊT », puis le rebrancher sur secteur.
- ➔ Replacer le tuyau d'aspiration à son emplacement.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO.