



PROCÉDURE SMUR

TEST DU MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR LP15



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

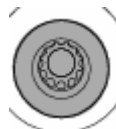
- Vérifier l'état général de l'appareil : absence de fissures, de choc, pochettes bien fixées, visseries présentes, écran, boutons, batteries...
- S'assurer de la propreté de l'appareil (Vigilance accrue sur la propreté des connectiques : sable, poussière...)
- Vérifier l'intégrité des accessoires : câbles de monitoring, pochettes de protection...
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Appuyer sur 
- Vérifier l'état des 2 batteries  (charge $\geq 1/2$) : sinon changer les batteries déchargées et les remettre en charge sur leur support

3- TEST UTILISATEUR

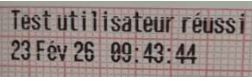
NB : Le défibrillateur effectue quotidiennement un auto-test à 03h00 (3:00 A.M.) . Celui-ci n'est pas exécuté lorsque le défibrillateur est déjà sous tension à 03h00 ou que l'alimentation n'est pas disponible.

- Appuyer sur 
- Sélectionner  à l'aide de la molette navigation rapide 
Le défibrillateur exécute les tâches suivantes :
 - Auto-test pour contrôler l'appareil.
 - Charge à 10 joules et décharge en interne (cette énergie n'est pas accessible au niveau du connecteur de thérapie).
 - Impression d'un rapport Réussi/Échec.

PROCÉDURE SMUR

TEST DU MONITEUR/DÉFIBRILLATEUR LP15

- Vérifier le rapport du test utilisateur : le message « Test utilisateur réussi » s'affiche sur l'écran et

sur le papier : 

- Raccorder le « testeur de défibrillateur » au câble de thérapie

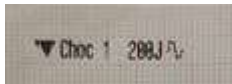


- Appuyer sur  : l'appareil indique « 200J »

- Appuyer sur  (le chargement de l'énergie souhaitée est inférieur à 3 secondes)
→ Le message « 200J disponible Appuyer bouton choc ! » s'affiche à l'écran

- Appuyer sur le bouton 

- Le message « énergie délivrée » apparaît
→ L'écran revient sur la page initiale et un rapport d'utilisateur s'imprime automatiquement
→ Vérifier la mention « choc 1 200J » sur le papier ainsi que la présence du sigle sur le tracé :



- Éteindre l'appareil en appuyant sur 
→ Rebrancher le câble de thérapie aux électrodes de défibrillation adulte prêtes à l'emploi
→ Ranger le « testeur de défibrillateur » dans la pochette prévue à cet effet et remettre le moniteur à sa place

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO