



PROCÉDURE SMUR

TEST DE L'ASPIRATEUR À MUCOSITÉS

LAERDAL



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : batterie, bocal, câble d'alimentation : le couvercle du bocal est hermétique, le connecteur coudé et les tuyaux sont solidement fixés
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION



- Vérifier la présence du témoin lumineux de charge
- Débrancher la prise secteur de l'appareil ou désadapter l'appareil de son support de charge : le témoin lumineux de fonctionnement sur batterie s'allume
- Allumer l'appareil en tournant l'interrupteur de vide, obstruer le tuyau d'aspiration patient et vérifier que chaque diode s'allume en fonction de la pression demandée par l'interrupteur
- Éteindre l'appareil en repositionner l'interrupteur de vide sur 0 mm Hg

3- TEST UTILISATEUR

- Appuyer sur  et laisser la touche enfoncée pendant que vous positionnez l'interrupteur de vide sur 500+ mmHg : l'indicateur « ON »  va clignoter rapidement (environ deux fois par seconde)
Remarque : Ne relâcher la touche TEST qu'au bout de 2 secondes au minimum une fois que l'interrupteur de vide a été mis sur 500+ mmHg. Le test commence immédiatement.
- Obstruer totalement le tuyau d'aspiration patient avec votre doigt



PROCÉDURE SMUR

TEST DE L'ASPIRATEUR À MUCOSITÉS

LAERDAL



- Dès que la diode 2 du bas de l'indicateur d'état de la batterie s'allume (au bout d'une seconde environ), vous pouvez relâcher 

- Laisser le tuyau obstrué : les diodes 2, 3 et 4 s'allument



- Relâcher le tuyau lorsque la diode 1 se rallume



- Mettre l'interrupteur de vide sur 0 mmHg pour quitter le programme de test de l'appareil.
- Rebrancher la prise secteur ou remettre l'appareil sur son support de charge : le témoin lumineux de charge s'allume
- Replacer le tuyau dans son emplacement.

- Être attentif au témoin de panne tout au long du test de l'appareil



Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO