

PROCÉDURE SMUR


TEST DU SYSTÈME DE COMPRESSION THORACIQUE LUCAS®




1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : sangle, attaches pour les poignets, ventouse, batterie, cordon d'alimentation, plan dur, coque de protection
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

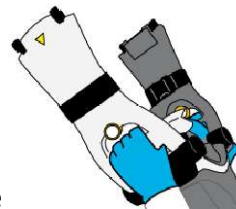

- Bloquer les clips de fixation en position fermée
- Tirer les anneaux de déverrouillage vers le haut pour vérifier que les clips de fixation reviennent en

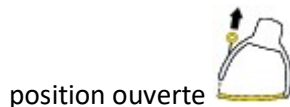

position ouverte

- Vérifier l'état des 2 batteries en les adaptant à l'appareil à tour de rôle et en appuyant sur le bouton



:la batterie doit au moins afficher  , sinon mettre en charge l'appareil à l'aide de son



cordon d'alimentation.

- Appuyer sur le bouton  : l'appareil s'allume et effectue un autotest



PROCÉDURE SMUR

TEST DU SYSTÈME DE COMPRESSION THORACIQUE LUCAS®



- Appuyer à nouveau sur  afin d'éteindre l'appareil.
- Ranger l'appareil dans sa coque de protection ainsi que l'ensemble des accessoires et le remettre à sa place.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO