



PROCEDURE SMUR

TEST DU RESPIRATEUR MEDUMAT EASY CPR





1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : pochette de protection, flexible O2, poumon test
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION


- Raccorder l'appareil à une source d'alimentation en oxygène.

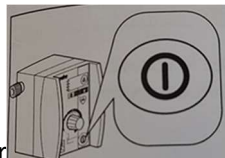

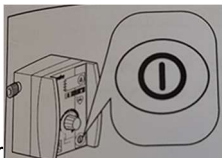- Appuyer sur  pour allumer l'appareil.

3- TESTS UTILISATEUR

- Lorsque l'assistance vocale est activée, le message « ouvrir la bouteille d'oxygène » est émis avant l'auto diagnostic.
- Ouvrir alors, la bouteille O2.
- Un auto-test s'effectue pendant deux secondes, les quatre leds s'allument furtivement et un bref

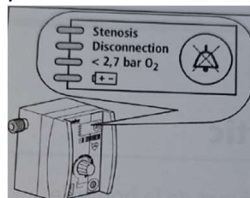

signal sonore retentit.

- Appuyer sur la touche  afin d'acquitter l'alarme : la tonalité cesse de retentir et le voyant s'éteint



PROCEDURE SMUR TEST DU RESPIRATEUR MEDUMAT EASY CPR



- ➔ *Si un défaut est détecté, toutes les LED de la zone d'alarme continuent de clignoter et une tonalité d'alarme est émise. Si l'assistance vocale est activée, le message « machine en panne ! Procéder à la ventilation alternative » est émis.*
- ➔ Raccorder le poumon test à la tubulure du respirateur.
- ➔ Vérifier que le poumon test se gonfle et se dégonfle correctement
- ➔ Comprimer le poumon test avec votre main et veiller à ce que l'alarme de pression retentisse.
- ➔ Retirer le poumon test de la tubulure puis, ranger le dans la pochette prévue à cet effet.
- ➔ Fermer la source d'oxygène.
- ➔ Eteindre l'appareil à l'aide du bouton 

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO