

PROCEDURE SMUR

TEST DU RESPIRATEUR

MEDUMAT Standard A




1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- ➔ Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- ➔ S'assurer de la propreté de l'appareil
- ➔ Vérifier l'intégrité des accessoires : pochette de protection, flexible O₂
- ➔ Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)


2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- ➔ Raccorder l'appareil à une source d'alimentation en oxygène, puis l'ouvrir.

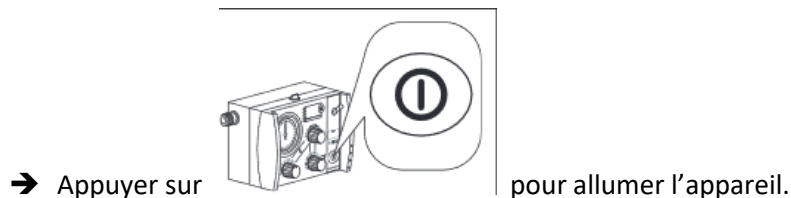

3- TESTS UTILISATEUR

- ➔ Dès la mise en marche du respirateur, l'appareil effectue un auto-test qui dure environ 2 secondes.
- ➔ Si l'appareil ne constate aucun défaut, les cinq DEL de champ des alarmes s'allument et un bref signal sonore retentit

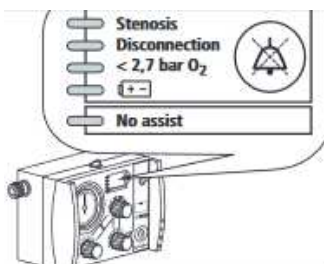



PROCEDURE SMUR TEST DU RESPIRATEUR MEDUMAT Standard A



Si un défaut est détecté, les LED de la zone d'alarme continuent de clignoter et une tonalité d'alarme est émise.

→ Appuyer sur la touche  afin d'acquitter l'alarme : la tonalité cesse de retentir et le voyant s'éteint

→ Eteindre l'appareil à l'aide du bouton 

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO