

PROCÉDURE SMUR

TEST DU RESPIRATEUR

MONNAL T60


1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil et son écran
- S'assurer de la propreté de l'appareil (Vigilance accrue sur la propreté des connectiques)
- Vérifier l'intégrité des accessoires : pochette de transport et fermetures éclair, flexible O2, câble d'alimentation
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Vérifier la présence du témoin lumineux de « charge sur secteur » sur l'appareil 
- Débrancher l'appareil de son câble d'alimentation : le témoin de « charge sur secteur » s'éteint , l'appareil émet un avertissement sonore.

- Appuyer sur le bouton  présent en haut sur le côté gauche de l'appareil

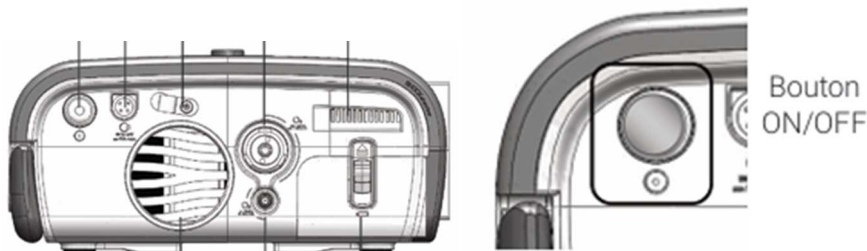

- Vérifier les témoins lumineux de fonctionnement sur batterie interne et externe (**charge ≥ 3/4**) :



, sinon remettre en charge l'appareil immédiatement à l'issue du test et vérifier régulièrement dans la journée l'efficacité de la charge et l'état des batteries (externe et interne) en rallumant l'appareil.

3- TEST UTILISATEUR

- Raccorder le flexible d'O2 à une source d'alimentation en oxygène ouverte.
- Raccorder le circuit patient de test obturé à l'appareil, ainsi que les filtres pour calcul des résistances et espaces mort.



PROCÉDURE SMUR

TEST DU RESPIRATEUR


MONNAL T60



- ➔ Appuyer sur « AUTOTESTS » sur l'écran tactile de l'appareil
- ➔ Valider le lancement du programme en appuyant sur « VALIDER » sur l'écran
- ➔ Lors de la phase « clôture des tests » l'appareil indique :



- ➔ Retirer le bouchon rouge au bout du circuit test
- ➔ Le message « tests réussis » s'affiche : le valider en appuyant sur « TERMINER » directement sur

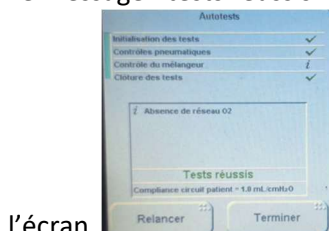

l'écran

Derniers tests :
20/01/2026 07:32
SUCCES

- ➔ La date et l'heure du dernier test se modifient à l'écran
- ➔ Éteindre l'appareil en appuyant sur  directement sur l'écran, valider l'arrêt de l'appareil en utilisant la molette de sélection en bas à droite.
- ➔ Débrancher le flexible d'O2 de la source d'alimentation en oxygène
- ➔ Remettre l'appareil sur son support et vérifier son alimentation électrique : le témoin de « charge sur secteur » s'allume , l'appareil émet un avertissement sonore
- ➔ Ranger la tubulure test dans la pochette prévue à cet effet.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO