



PROCÉDURE SMUR

TEST DE L'OTOSCOPE

Welch Allyn Pocketscope Model 211



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'inventaire de l'appareil : (Cf. portail : <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n* de suivi du BUMAT)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Sortir l'appareil de sa pochette
- Tourner la bague centrale dans le sens des aiguilles d'une montre, en position éteinte  vers  la position allumée.
- Vérifier qu'une lumière est émise de l'appareil.
- Eteindre celui-ci, en tournant la bague centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Reconditionner la pochette et la ranger dans l'emplacement prévu à cet effet.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO.