



PROCÉDURE SMUR

TEST DU PSE AGILIA INJECTOMAT



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général de l'appareil : absence de fissures, de choc, visseries présentes, écran, boutons (Retourner régulièrement l'appareil afin de vérifier la présence des vis sous l'appareil qui ont tendance à se dévisser avec les vibrations du véhicule)
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'intégrité des accessoires : rampe de charge, cordon d'alimentation
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Vérifier la présence du témoin lumineux de « charge sur secteur » sur l'appareil
- Débrancher la rampe de charge de son câble d'alimentation : le témoin de « charge sur secteur » de l'appareil s'éteint, et le témoin de fonctionnement sur batterie s'allume : l'appareil émet un avertissement sonore

3- TEST UTILISATEUR

- Mettre en place une « seringue test » avec un grand volume (45 à 50 ml) dans l'appareil, fixer le mécanisme de poussoir et le maintien-seringue, valider le modèle en appuyant sur

- Tester le fonctionnement de chacune des touches et le bon fonctionnement de l'afficheur (les chiffres doivent s'afficher correctement)

- Régler un débit à 200ml/h à l'aide de ces boutons , puis valider et regarder visuellement si le piston avance régulièrement

- Fonction bolus : Appuyer une première fois sur , puis tout de suite une autre fois un peu plus longtemps pour réaliser un bolus de 5mL

- Tester le mauvais positionnement de la seringue :

Ouvrir d'abord le maintien seringue, l'appareil sonne et s'allume « *installation seringue* » , acquitter

l'alarme en appuyant sur , puis refermer le maintien seringue

Ouvrir ensuite, le mécanisme de poussoir, l'appareil affiche « *installation seringue* ».

Repositionner correctement la seringue dans son emplacement.



PROCÉDURE SMUR TEST DU PSE AGILIA INJECTOMAT



- Régler le volume de la seringue à 5mL, puis réinsérer la seringue dans son emplacement
- Valider la perfusion en appuyant sur  3 fois de suite



- L'alarme « fin perfusion » apparaît

- Appuyer sur  pour arrêter la perfusion
- Eteindre l'appareil en appuyant sur  pendant 3secondes
- Rebrancher la rampe de charge sur secteur, replacer la seringue test dans la pochette test du véhicule.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO