

PROCÉDURE SMUR

TEST DU MICROPUMP™ MP mlh+ (MICREL)





1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil et son écran
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)
- Vérifier l'inventaire de l'appareil (Cf. portail <https://rdv.bmpm13.fr/inventaires-smur/>)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Faire glisser le capot du compartiment piles, situé sous l'appareil. Insérer les piles (6x AAA, type LR03) dans le compartiment en tenant compte de la polarité comme indiqué sur la photo. Puis, remettre le capot en place.

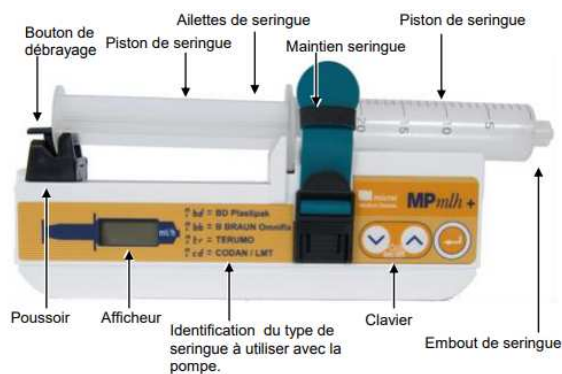

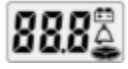- Mise en marche : maintenir les touches  &  durant 3 secondes
- Lorsque l'appareil s'allume, l'écran s'affiche de cette façon : 
- Une fois allumée (ON), la pompe est en attente. La dernière marque de seringue utilisée clignote et un signal sonore est émis toutes les minutes. Le symbole  est celui de la sélection de seringue, tant pour la marque que pour le volume de celle-ci. 



PROCÉDURE SMUR

TEST DU MICROPUMP™ MP mlh+ (MICREL)



- Appuyer sur  pour régler la marque de la seringue. Appuyer sur  pour confirmer le changement de marque et passer à la sélection du volume de seringue. Quatre marques sont disponibles : comme indiqué sur l'étiquette avant de la pompe (cf. photo ci-dessous) .

bd = BD Plastipak™
bb = B BRAUN Omnifix®
br = TERUMO®
cd = CODAN / LMT

- Appuyer sur  pour régler le volume de la seringue. Appuyer sur la touche  pour confirmer le volume de la seringue.

- Appuyer sur  pour régler le débit de la perfusion. Appuyer sur la touche  pour confirmer le débit souhaité.

La marque et le volume de la seringue ainsi que le débit sont affichés successivement, tandis qu'un

symbole « ellipse » tourne. 

- **Test fonction bolus:** Appuyer et maintenir la touche  et appuyer une fois sur la touche  .
Relâcher la touche  quand un bip sonore retentit : La perfusion du bolus commence. L'appareil

affiche « d + la quantité de bolus réalisée ». 

Le bolus ne peut être administré que si le débit est inférieur ou égal à 16,5ml/h.

- Arrêter la perfusion et éteignez l'appareil en maintenant les touches  &  pendant 3 secondes.

Ouvrir le capot du compartiment à piles, les retirer pour les ranger dans la pochette de conditionnement.

- Si toutefois les piles sont vides l'appareil affichera : 
Dans ce cas, les changer.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO.



PROCÉDURE SMUR

TEST DU MICROPUMP™ MP mlh+ (MICREL)

