

PROCÉDURE SMUR

TEST DU THERMOMETRE AURICULAIRE

Thermoscan PRO 6000 Welch Allyn BRAUN®




1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil
- Vérifier l'étiquetage BMPM : présent et lisible (ou à défaut n° de suivi du BUMAT)

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION



- Sortir l'appareil du socle receveur
- L'appareil s'allume en moins de 3 secondes

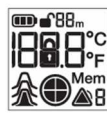

puis



- L'écran affiche
- Vérifier le témoin de pile  (**≥1/3 de batterie**) : sinon changer les piles.
- Reposer le thermomètre dans le socle receveur.
- L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 10 secondes après la dernière mesure.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO