



PROCÉDURE SMUR

TEST DU THERMOMETRE ELECTRONIQUE Pelimex®



1 – ÉTAT GÉNÉRAL

- Vérifier l'état général : absence de fissures, de choc sur l'appareil
- S'assurer de la propreté de l'appareil

2- FONCTIONNEMENT / MISE SOUS TENSION

- Sortir l'appareil de sa boîte de protection
- Allumer l'appareil à l'aide du bouton principal « marche/arrêt ». L'appareil émet un léger bip sonore.
- L'écran affiche par défaut « Lo °c ». Il est prêt à être utilisé.
- Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « marche/arrêt » pour éteindre l'appareil.
- Reconditionner l'appareil dans sa boîte de protection et la ranger dans l'emplacement prévu à cet effet.

Si vous rencontrez une anomalie, veuillez contacter le bureau matériel en HO ou l'infirmier de garde SSO en HNO.